



Oxivir Excel® Foam CE

Detergente desinfectante de superficies y aparatos médicos no invasivos

Descripción

Oxivir Excel Foam CE es un limpiador desinfectante de amplio espectro de eficacia con tiempos de contacto muy reducidos. Basado en la tecnología patentada de Diversey de Peróxido de Hidrógeno Acelerado, la formulación de Oxivir Excel Foam CE puede ser aplicada para desinfección de aparatos y equipos médicos no invasivos.

Propiedades

- Bactericida, Virucida, Levuricida
- Desinfecta en 1 minuto
- Seguro con los pacientes los usuarios y las superficies
- Limpiador efectivo
- Conveniente, no requiere preparación ni bayetas
- Sin perfume
- Se descompone en agua y oxígeno
- No requiere aclarado


Beneficios

- Amplia eficacia que proporciona los más altos niveles de protección de los pacientes. Test de efectividad siguiendo la normativa europea. Posee actividad virucida completa, incluyendo Poliovirus, Adenovirus y Murine norovirus. Efectivo frente a virus envueltos VIH, VHB, VHC, Gripe, Vaccinia virus y Coronavirus.
- Tiempos reducidos de contacto que garantizan la eficacia desinfectante.
- Además de sus propiedades desinfectantes, posee grandes propiedades limpiadoras, además de desincrustación, previniendo la formación de depósitos de cal.
- Buen perfil de seguridad para el usuario, sin advertencias de peligro, no contiene ingredientes irritantes respiratorios
- La formulación de AHP es respetuosa con las superficies y prolonga su vida útil
- Adecuado para uso en áreas de alto riesgo de infección, incluyendo quirófanos, UCIs, unidades de neonatos, unidades de neonatos y habitaciones de pacientes.

Modo de empleo

Limpieza con Pulverizador y desinfección:

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Aplicar en las superficies, en una bayeta limpia y pasar la bayeta por la superficie o aplicar directamente sobre la superficie presionando el gatillo del cabezal espumante.
3. Pasado el tiempo necesario de contacto *, volver a pasar la bayeta o dejar secar al aire.

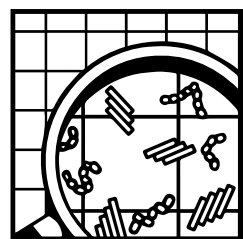

© A.I.S.E.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



Oxivir Excel® Foam CE

Información técnica

Apariencia: Líquido transparente incoloro

Olor: Neutral

pH (en uso): 1.95

Densidad Relativa (20°C): 1.000

Punto de inflamación (°C): N/A

Caducidad: 720 días

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diverseym.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Restringido a usos profesionales.

Producto con muy estable. Dos años de vida desde la fecha de fabricación.

Compatibilidad del producto

No mezclar con otros productos químicos. No usar con agua caliente. No usar sobre superficies sensibles al agua o a productos ácidos. Utilizado bajo las recomendaciones de uso de Diversey Oxivir Excel Foam es adecuado para la mayoría de materiales comunes.

Información microbiológica

Eficacia probada cumpliendo las normas europeas: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476 y EN16615.

Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

Envases disponibles

Oxivir Excel Foam CE está disponible en 6x0.75L.